

Video Guides




Italiano


Carbon Series Rollators
Accessori

by  **ACRE**

Indice

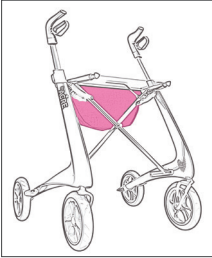

Borsa organiser 5

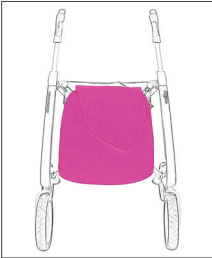


Borsa da weekend 6



Borsa per la spesa 7



Zainetto avventura 9

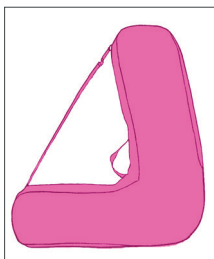


Borsa da viaggio

10



Schienale

12

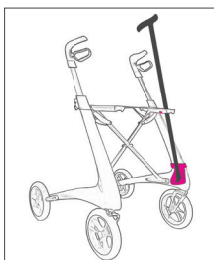

Portabastone

14

Manutenzione

15

Video informativi



Scannerizza il codice QR per visionare i video informativi di ciascun accessorio oppure visitate il sito web byacre.com.


Borsa organiser

Piccola borsa per i vostri bisogni



For/Zum/Per

Carbon Ultralight
Carbon Overland

⚠ Non riempite la borsa più del volume previsto.
Non sovraccaricate la borsa (+2kg/ +4.4 lbs).

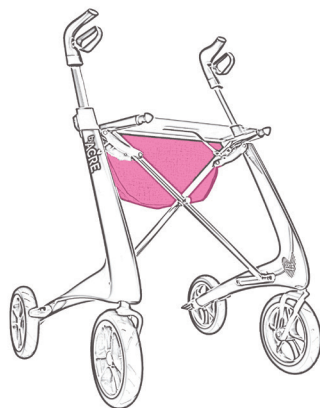

Montaggio

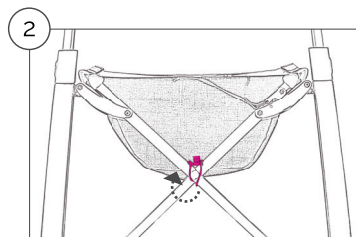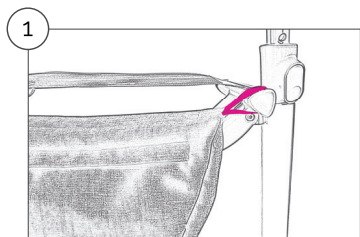

1. Piega un pochino il rollator, così la borsa sarà più facile da attaccare. Fissate la borsa mettendo i due passanti piatti sui lati del sacco intorno alla parte cilindrica più sottile dei punti di fissazione sul retro del deambulatore. Sono situati nel prolungamento delle barre che supportano la seduta. Assicuratevi che la cerniera lampo sia opposta alla seduta.
2. Attorcigliate il piccolo passante elastico intorno al centro della croce in alluminio e fissate l'estremità del passante elastico intorno al piccolo tappo in plastica della croce situato sul lato del rollator, di fronte al retro della borsa.

NB: Accertatevi di sentire un 'click' quando aprite il rollator così da assicurarvi che non ci sia niente ad intralciare il meccanismo di chiusura.

Specificità tecniche

Materiale:	100% Poliestere
Altezza:	185 mm (7,3")
Larghezza:	450 mm (17,7")
Profondità:	105 mm (4,1")
Peso:	90 g (0,2 lbs)
Capacità di carico:	2 kg (4,4 lbs)


Borsa da weekend

Borsa capiente per una gita fuoriporta o un weekend in città



For/Zum/Per

Carbon Ultralight
Carbon Overland

- ⚠ Non dimenticate di chiudere la cerniera lampo quando camminate per non perdere nessun oggetto per strada. Non riempite la borsa più del volume previsto.
Non sovraccaricate la borsa con oggetti pesanti (+5kg/ +11 lbs).

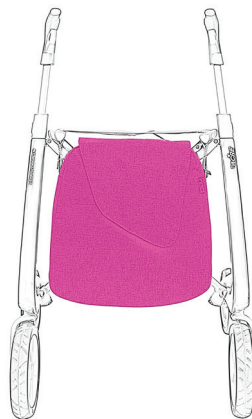

Montaggio

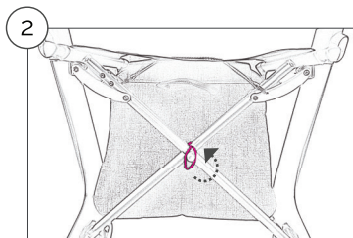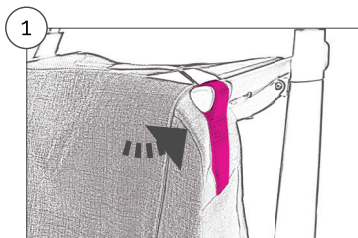

1. Fissate la borsa da weekend mettendo i due passanti piatti negli angoli superiori della borsa, intorno alle estremità delle barre della seduta. Premuratevi che il lato con la calotta sia girato verso l'esterno e lontano dalla seduta.
2. Attorcigliate i piccoli passanti elastici intorno al centro della croce e fissate l'estremità del passante elastico intorno al piccolo tappo in plastica situato sul lato del rullator, di fronte al retro della borsa.

NB: Staccate la borsa allentando l'asola elastica e le due cinghie dal rullator.

Specificità tecniche

Materiale:	100% Poliestere
Altezza:	350 mm (13,8")
Larghezza:	380 mm (15")
Profondità:	160 mm (6,3")
Peso:	350 g (0,8 lbs)
Capacità di carico:	5 kg (11 lbs)

Borsa per la spesa

Borsa spaziosa per la vostra spesa





For/Zum/Per

Carbon Ultralight
Carbon Overland

- ⚠ Non riempite la borsa più del volume previsto.
Non sovraccaricate la borsa con oggetti pesanti (+5kg/ +11 lbs).



Montaggio

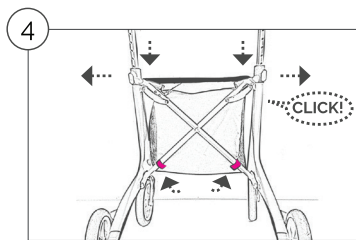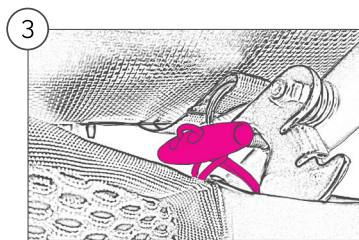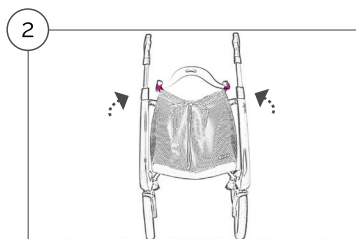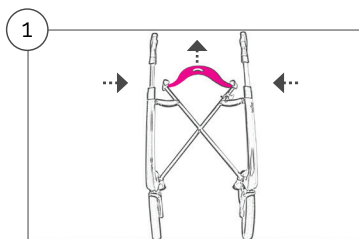

1. Tirate la seduta verso l'alto per ripiegare un po' il rollator (circa 10 cm).
2. Posizionate le due cinghie piatte negli angoli della borsa sui ceppi delle barre della seduta. Assicuratevi che il lato con la rete sia di fronte a voi.
3. Passate il nastro elastico intorno al tubo in alluminio sopra la chiusura in metallo e alla destra della cerniera in plastica. Passate il bottone all'inglese sull'elastico attraverso il passante elastico della borsa.
4. Aprire il rollator. Aprite la fettuccia in velcro della borsa da spesa e posizionate le estremità intorno ai tubi in alluminio del rollator. Chiudete la fettuccia in Velcro e assicuratevi che sia ben fissata intorno ai tubi.

NB: Accertatevi di sentire un clic quando aprite il rollator per assicurarvi che niente impedisca al meccanismo di fissarsi.

NB: Staccate la borsa togliendo tutte le fettucce in Velcro, le asole elastiche e le cinghie del rollator.

Specificità tecniche


Materiale:	100% Poliestere
Altezza:	300 mm (11,8")
Larghezza:	370 mm (14,6")
Profondità:	120 mm (4,7")
Peso:	310 g (0,7 lbs)
Capacità di carico:	5 kg (11 lbs)

Zainetto avventura

Zainetto da esterno robusto per le vostre avventure



For/Zum/Per

Carbon Ultralight
Carbon Overland

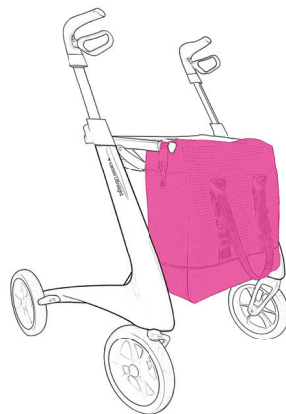

- ⚠ Non dimenticate di chiudere la cerniera lampo quando camminate per non perdere nessun oggetto per strada.
Non riempite la borsa più del volume previsto.
Non sovraccaricate la borsa con oggetti pesanti (+5kg/ +11 lbs).

Montaggio

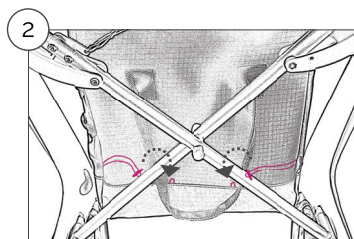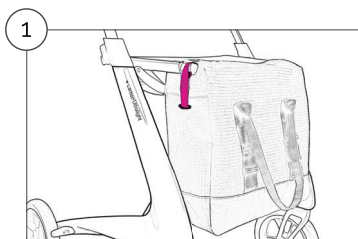

1. Guidate le cinghie piatte all'interno dello zaino attraverso le fessure laterali e fissatele alle estremità delle barre della seduta.
2. Passate le asole elastiche con i bottoni all'inglese sul retro dello zaino intorno alla croce in alluminio e legatele attraverso le piccole asole elastiche in fondo allo zaino..

NB: Slegate lo zaino allentando gli elastici e le due cinghie piatte del rollator.

Specificità tecniche


Materiale:	100% Poliestere
Altezza:	340 mm (13,4")
Larghezza:	350 mm (13,8")
Profondità:	160 mm (6,3")
Peso:	225 g (0,5 lbs)
Capacità di carico:	5 kg (11 lbs)

Borsa da viaggio

Borsa da viaggio pratica per il vostro rollator

For/Zum/Per





Carbon Ultralight
Carbon Overland

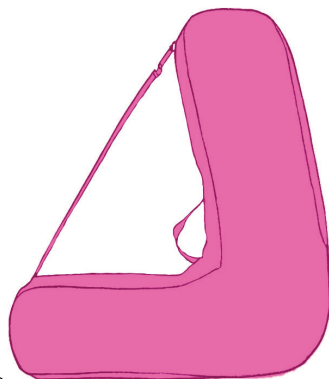

⚠ Il rollator può essere riposto all'interno della borsa da viaggio solamente se le maniglie sono fissate a un'altezza che non supera il secondo foro.

Nel riporre il rollator nella borsa fate attenzione a non azionare il freno di stazionamento dello stesso.

Utilizzo

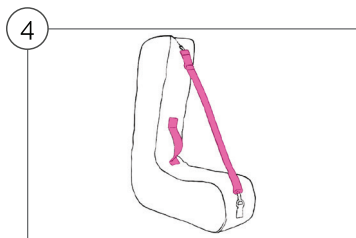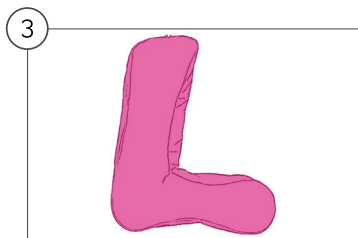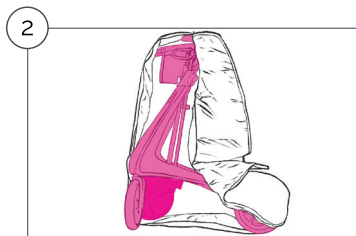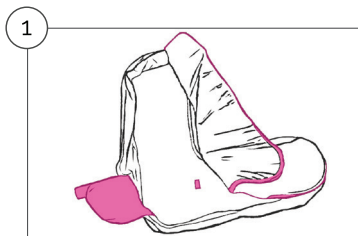

1. Mettete la borsa da viaggio su una superficie piatta e apritela. Assicuratevi che la calotta foderata sia rivolta verso l'esterno.
2. Mettete il deambulatore con precauzione nella borsa da viaggio e assicuratevi che i forchettoni avanti siano l'uno davanti all'altro. In seguito fate scivolare la calotta foderata tra i forchettoni e fissateli con il pezzo di Velcro.
3. Chiudete la borsa da viaggio facendo attenzione che non ci siano tensioni sulla cintura lampo. Potrebbe essere necessario aggiustare la posizione del rollator nella borsa.
4. Trasportate il rollator per i manici o per la cinta.

Specificità tecniche

Materiale:	100% Poliestere
Altezza:	Carbon Ultralight: 850 mm (33,5") // Carbon Overland: 900 mm (35,4")
Larghezza:	Carbon Ultralight: 700 mm (27,6") // Carbon Overland : 760 mm (29,9")
Profondità:	Carbon Ultralight: 210 mm (8,3") // Carbon Overland: 280 mm (11,0")
Peso:	Carbon Ultralight: 820 g (1,8 lbs) // Carbon Overland: 935 g (2,1 lbs)

Schienale

Offre sostiene la zona lombare quando siete seduti

For/Zum/Per



Carbon Ultralight
Carbon Overland



⚠ Verificate che lo schienale sia fissato correttamente prima di utilizzarlo. Le morse dello schienale devono essere saldamente fissate sulle maniglie di destra e di sinistra del rollator senza che scivolino verso l'esterno o verso l'alto o il basso.

Assicuratevi che lo schienale sia orientato correttamente, cioè dal lato opposto a quello verso cui camminate.

Montaggio, lato sinistro

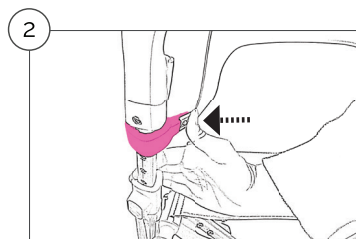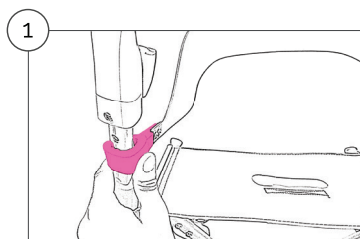

1. Tenete la morsa come si vede sull'illustrazione, dove le morse si attaccano dietro la maniglia a sinistra. Spingete la morsa verso la maniglia fino a quando non sia fissata intorno alla stessa. A questo stadio le morse possono ancora scivolare verso l'alto o verso il basso sulla barra della maniglia.

Consiglio : le morse si fissano più facilmente se le spingete dal lato opposto alla seduta e verso l'interno.

2. Individuate un'altezza preferibile e girate le morse in senso antiorario fino a quando non sentite un clic. Sappiate che la piccola protuberanza all'interno della morsa si deve inserire in una delle fessure della barra della maniglia, fatta eccezione della fessura più in basso.

Consiglio!



Potete regolare lo schienale all'altezza che preferite:

1) Fissandolo all'altezza che avete scelto oppure

2) Fissando lo schienale nel buco superiore e regolando in seguito l'altezza delle maniglie verso l'alto o verso il basso. Cercate di regolare l'altezza un po' più in alto e un po' più in basso per capire cosa vi conviene al meglio.

Nota : Ci deve essere almeno una fessura visibile sulla stegola per poter fissare lo schienale.



Montaggio, lato destro

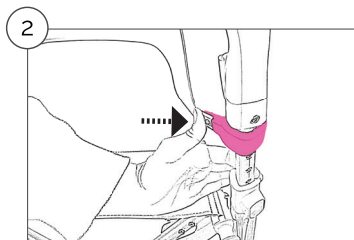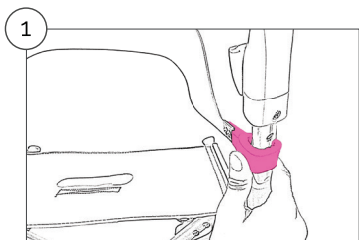

Ripetete le fasi 1 e 2 e spingete le morse di montaggio in senso orario fino a sentire clic e che la morsa sia fissata.

Astuzia! Se è difficile fissare le morse nella fessura desiderata, potete provare a scegliere la fessura in alto e aggiustare in seguito l'altezza della maniglia. Se le morse sono fissate nella fessura in alto, possono essere spostate fino alla cima alla barra prima di essere girate in senso orario e fissate.

Come smontare

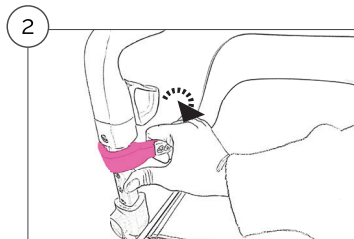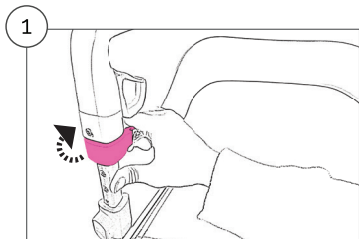

1-2. Afferrate le morse di fissaggio e giratele in senso orario fino a quando non si staccano dalle maniglie. Ripetete le fasi 1 e 2 sul lato destro, ma girate le morse in senso antiorario fino a quando le morse non si staccano dalla stegola.

Specificità tecniche

Materiale:	PE
Altezza:	150 mm (5,9")
Larghezza:	Regular/ Klassisch/ Klassisk: 850 mm (33,5") Wide track/ Komfort/ Overland: 890 mm (35,0")
Profondità:	3 mm (0,12")
Peso:	200 g (0,4 lbs)

Portabastone

Tenete il vostro bastone sempre con voi





For/Zum/Per

Carbon Ultralight
Carbon Overland

⚠ Le illustrazioni di questo manuale si basano su un portabastone per lato sinistro. Se avete un portabastone per lato destro, fissatelo e slacciatelo a destra.




Montaggio

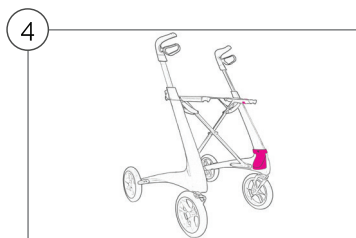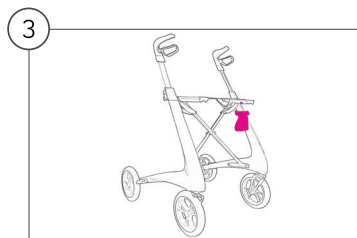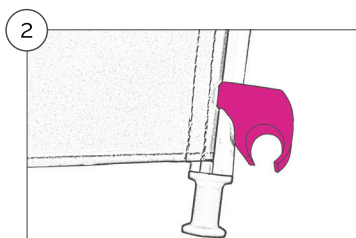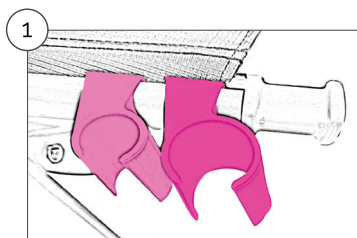

1. Il set portabastone è composto da 2 pezzi superiori di taglia differente. Scegliete la taglia adatta al vostro bastone o del vostro trepiedi.
2. Fissate la morsa nello stelo della seduta, dove volete fissare il vostro portabastone.
- 3-4. Spingete la parte inferiore del supporto del bastone sulla parte stretta dello stelo del rollator e spingetela verso il basso fino a che si sia posizionata sulla parte più larga dello stelo.

Consiglio! Se volete che la parte inferiore del portabastone sia ben fissato potete utilizzare un adesivo.

Utilizzo

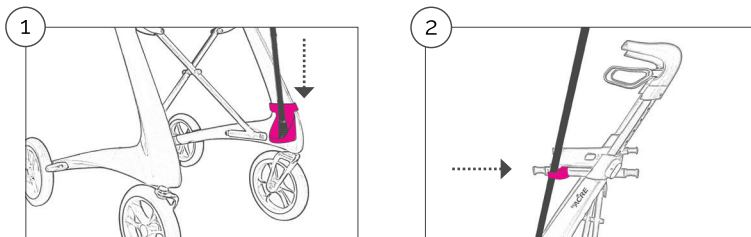

1. Poggiate la parte inferiore del bastone sulla parte bassa del portabastone e fissate il bastone sulla parte alta allo stelo della seduta.
2. Per staccare il bastone spingetela semplicemente verso l'avanti fino a che si stacchi dalla morsa situata sulla struttura della seduta. Sollevate il bastone fuori dalla parte inferiore del portabastone.

Specificità tecniche

Materiale:	PE
Altezza:	10 cm (3,9")
Larghezza:	6 cm (2,4")
Diametro:	5,5 cm (2,2")

Manutenzione

Tessuti

- ⚠ Potete pulire le borse con un panno umido. Se necessario si possono anche lavare a mano a 30 gradi celsius. È nostra raccomandazione di trattare la vostra borsa prima di utilizzarla e di ripetere l'operazione 2 o 3 volte l'anno a seconda del tempo atmosferico e dell'utilizzo. Se trascorrete molto tempo fuori quando piove vi raccomandiamo di trattare la vostra borsa ogni 3 mesi. Potete utilizzare un trattamento impermeabilizzante regolare per il cuoio o per i tessuti o per la microimpregnazione.

Nota : il trattamento impermeabilizzante può scurire la tinta del tessuto.

Plastica

- ⚠ Lo schienale e il portabastone possono essere puliti utilizzando un panno umido. Un detergente può ugualmente essere utilizzato.



Ideato in Danimarca, fatto a mano in Cina

 **by ACRE ApS**

I.C. Modewegs Vej 1, 2800 Lyngby, DK
+45 33 44 55 44
contact@byacre.com

Supporto

Deutschland
08000009479
kundenservice@byacre.com

UK & International
+44 0330 828 1776
customerservice@byacre.com

USA
(304) 250-9505
assistance@byacre.com

Rev1.0
September 2022

